

ASPIRADOR DE SECREÇÕES
PORTÁTIL COM REGULAGEM
MANUAL DE VÁCUO

COMFY VAC

Com o comfy Vac MD, a
aspiração torna-se uma
tarefa simples e segura.



Aspirador manual de secreções fácil de usar, portátil e compacto. Ele é projetado para fornecer sucção eficiente, atendendo às necessidades de remoção de fluidos.

Aspirador de Secreções Portátil **COMFY VAC** com Regulagem Manual de Vácuo



Reservatório 250ml



Tubo rígido ou flexível

O **Aspirador de Secreções Portátil COMFY VAC MD** é uma bomba com acionamento manual, portátil, sem uso de fonte elétrica nem baterias.

Indicado para a aspiração de fluídos das cavidades orofaríngeas para uso doméstico, atendimento de primeiros socorros e resgate pré-hospitalar, ou em qualquer outro ambiente desejado para a finalidade de uso.

- Pode ser utilizado com uma mão e ambidestro, permite que a outra mão fique livre para outras tarefas importantes no atendimento ao paciente.
- Possui reservatório transparente com mecanismo que impede o retorno ou transbordamento do fluído aspirado.
- Com acionamento manual, ao puxar a alavanca no sentido do punho gera-se uma pressão negativa que é enviada através do tubo de sucção aspirando o fluído para o reservatório.
- Com Regulagem Manual de Vácuo permite ajustar o controle da pressão de vácuo através da válvula, em duas opções: 50% (250 mmHg) e 100% (500 mmHg):
- Para uso infantil recomenda-se a regulagem em 50% (250 mmHg);
- Para uso adulto recomenda-se a regulagem em 100% (500 mmHg)

Regulagem Manual de Vácuo



50% (250 mmHg);



100% (500 mmHg)

